


Lame microchirurgiche a lancia

K-5600




Blade thickness: 0.38 mm

K-5610

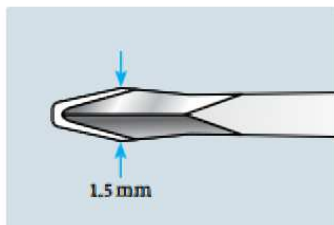

Blade thickness: 0.38 mm

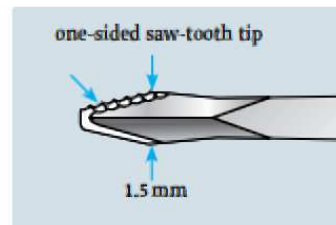

Gli strumenti microchirurgici FEATHER® costituiscono un ideale sistema di strumenti con lame e manici intercambiabili ideali per un lavoro flessibile ed efficiente durante le procedure microchirurgiche.

Le lame FEATHER® per microchirurgia sono prodotte in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medico utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.

La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari e ultra affilati.

Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende lame e manici realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutte le lame sono sterilizzate a raggi gamma e pronte per l'uso subito dopo l'apertura della confezione.

Una punta affilata di precisione realizzata su acciaio inossidabile di grado medico e una forma molto originale garantiscono un'eccellente facilità d'uso e un'efficienza di lavoro che difficilmente può essere fornita da lame convenzionali.

I manici sono realizzati in lega di titanio e sono tutti disponibili in diverse forme e dimensioni per soddisfare le esigenze dei chirurghi. Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa sicura e una manipolazione sicura dello strumento.

- ▶ Lame speciali per microchirurgia
- ▶ Gamma completa con diversi tipi di lame e manipoli; disponibili come un sistema
- ▶ Contenitore di plastica per proteggere la punta
- ▶ Confezionato sigillato e poi sterilizzato ai raggi gamma
- ▶ Immediatamente pronto per l'uso dopo l'apertura della confezione



Nome Commerciale

Feather lama per incisioni di precisione

Indicazioni d'uso

Interventi di neurochirurgia

Caratteristiche

Le lame microchirurgiche FEATHER® K-5600 e K-5610 sono lame ultra affilate, a forma di lancia, con e senza bordo dentellato su un solo lato e punta arrotondata per microincisioni. Sono appositamente progettate per il taglio della membrana aracnoide e possono essere utilizzate come una spatola per lo stripping. Il lato non affilato della lama può essere usato come una spatola.

In particolare la lama K-5610 è ottima per la manipolazione dei tessuti e presenta uno dei due lati della lancia dentellato, caratteristica utile per il taglio dei capillari più piccoli.

Il bisturi è dotato di protezione di sicurezza anti taglio, rimovibile all'atto dell'impiego.

Avvertenze

Bisturi per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

Possibilità di sterilizzazione in autoclave

La custodia in plastica è realizzata in resina autoclavabile che permette di sterilizzare la lama in autoclave mentre si trova nella custodia.

La sterilità è garantita dal particolare tipo di confezione in foglio di alluminio, di pratico impiego, entro i limiti di scadenza indicati. Eventuali alterazioni della confezione pregiudicano la sterilità del prodotto.

Ciascuna lama può essere sterilizzata in autoclave ed essere riutilizzata sotto la responsabilità del chirurgo. Il numero di casi per strumento dipende dalla modalità di impiego e di manipolazione del bisturi.

Un'efficace pulizia/disinfezione costituisce il prerequisito indispensabile per un'efficace risterilizzazione dei prodotti. Assicurarsi che per la pulizia/disinfezione e la sterilizzazione vengano utilizzati esclusivamente processi specifici per il dispositivo/prodotto opportunamente omologati e che i parametri convalidati vengano rispettati in ciascun ciclo.

Prima di riutilizzare il prodotto, ispezionare visivamente il manico ed esaminare la lama al microscopio. Non riutilizzare qualora il prodotto risulti danneggiato.

Pulizia e disinfezione

Pulizia manuale

- Pulire il bisturi con acqua distillata o sterile subito dopo l'uso.
- Utilizzare un pezzo di garza o altro materiale simile e pulire delicatamente la lama dal gambo verso la punta, partendo dal bordo tagliente.
- Posizionare la lama nel contenitore in plastica e rimuovere il manico.

Pulizia meccanica

Se disponibile, pulire/disinfettare la lama/il manico meccanicamente utilizzando una soluzione alcalina (pH>10, minimo 55°C) o in alternativa pulire la lama in un bagno ad ultrasuoni.

Asciugatura

- Collegare la lama e il manico e asciugarli completamente. Utilizzare un pezzo di garza o altro materiale simile. Asciugare delicatamente la lama dal gambo verso la punta, partendo dal bordo tagliente.
- Riporre la lama nel contenitore in plastica e rimuovere il manico dalla lama. Assicurarsi che la lama sia fissata saldamente.

Risterilizzazione

Risterilizzare la lama mediante autoclave (temperatura a 134°C, tempo di esposizione minimo: 5 minuti in caso di prodotti puliti meccanicamente con soluzione alcalina oppure 18 minuti qualora i prodotti non siano stati puliti con una soluzione alcalina).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 5 microlame sterili.

Ogni microlama è disponibile in custodia protettiva in policarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento indicata sulla singola confezione.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Assenza di lattice e ftalati


Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Lama Feather microchirurgica ultra affilata a lancia, punta arrotondata, larghezza massima lama 1,5 mm, spessore 0,38 mm	PFNK5600	K-5600	70511/R
Lama Feather microchirurgica ultra affilata a lancia, bordo dentellato su un solo lato, punta arrotondata, larghezza massima lama 1,5 mm, spessore 0,38 mm	PFNK5610	K-5610	70513/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice L010102 - Lame per Bisturi



• K-5610

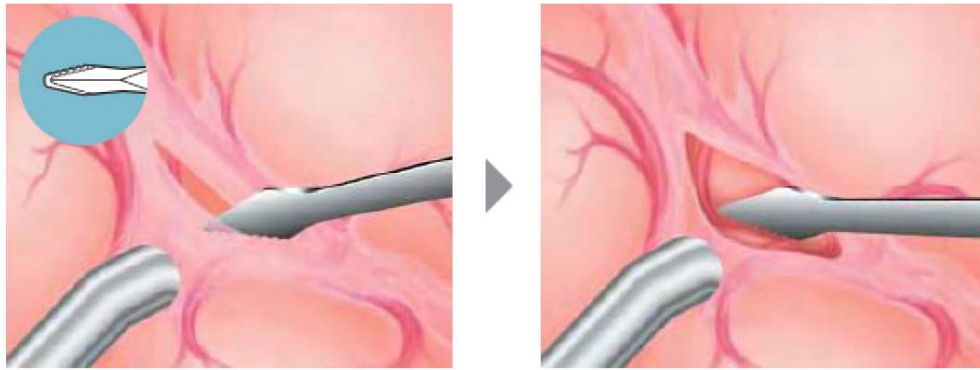


La membrana aracnoide che scorre sul vaso sanguigno può essere tagliata in modo sicuro con il lato dentellato.

È anche possibile staccare la membrana aracnoide e l'encefalo utilizzando la faccia laterale della lama come una spatola.

Modalità di inserzione del bisturi nel manico

Assembly instructions

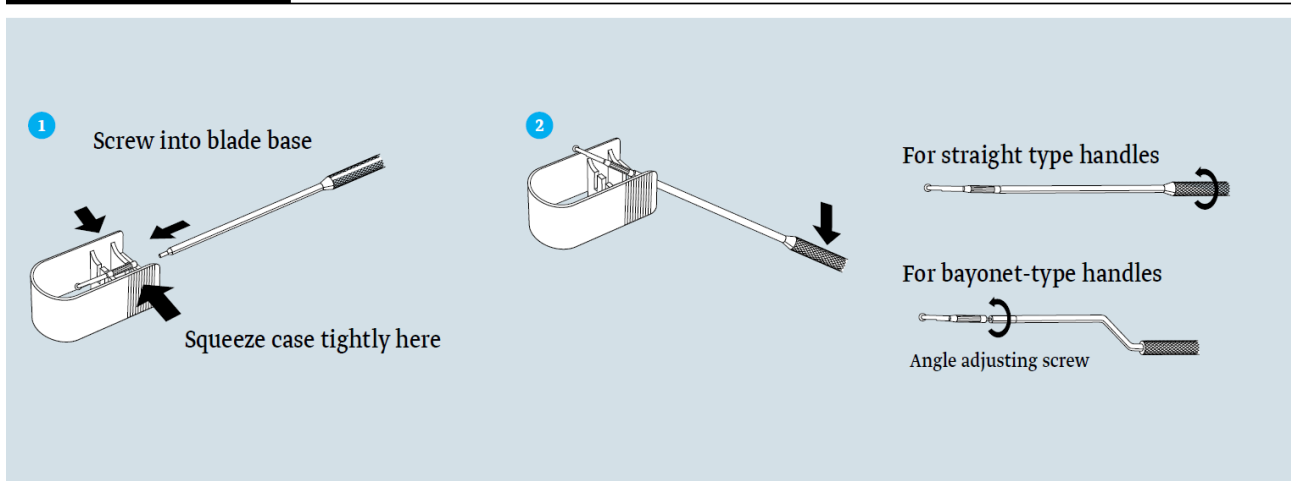

Fabbricante

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

Mandatario

pfm medical ag - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

CB MEDICAL 
QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982

FEATHER ®

C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 5-06/07/2020