




## Lang Stereotest II

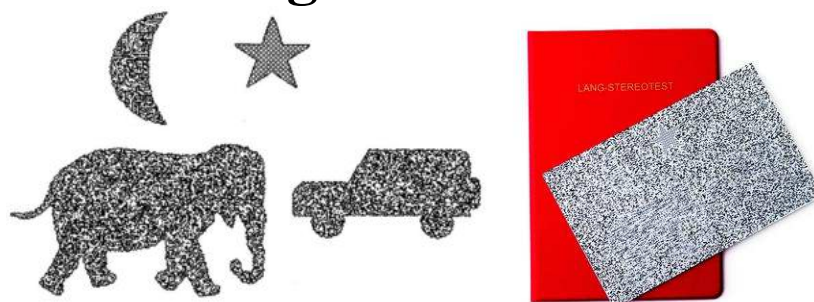

L' originale Stereotest II del Professor Joseph Lang.

Lo Stereotest II di Lang rappresenta uno sviluppo ed un completamento del precedente Stereotest I di Lang (gatto, automobile, stella).

Anche questo test si fonda sugli stessi principi ottici per l'esame della visione binoculare.

Vengono presentate tre immagini (elefante, auto e quarto di luna) visibili sono in visione binoculare ed una stella che può essere percepita anche in visione monoculare ma che appare in rilievo se l'osservatore utilizza la visione binoculare normale.

Molti oftalmologi ed ortottiste che utilizzano lo Stereotest I di Lang desiderano avere a disposizione un altro test, fondato sullo stesso principio, per evitare i problemi derivanti dalla memorizzazione delle figure.

I punti aleatori di questa nuova versione sono più fini e meno densi. Le disparità stereoscopiche sono più piccole: 200" per la stella e la luna, 400 per l'auto e 600 per l'elefante, per una distanza d'esame di 40 cm.

La stella, visibile in visione monoculare, serve ad attirare l'attenzione dei pazienti più piccoli ma procura altresì la soddisfazione di riconoscere almeno una figura anche ai soggetti che non hanno una visione stereoscopica.

Lo Stereotest II Lang viene fornito completo di apposito astuccio contenente le dettagliate istruzioni per l'uso.

### Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

### Materiale informatico (video online)

<https://www.lang-stereotest.com/pages/video-showcase>

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Stereotest II Lang in astuccio	LG005	LGS02	101977/R

Dispositivo non invasivo - Classe I - Rif. 1.1 Regola 1 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Z12120120 - Codice CIVAB NON CLASSIFICATO

### Fabbricante

Lang Stereotest Ltd - CH

### Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

