

AJL Blue Colorante Tissutale



AJL Blue è un colorante tissutale biocompatibile da utilizzare come ausilio nella chirurgia oculare. AJL Blue è una soluzione sterile e apirogena di Trypan Blue (Blu Tripano) per la quale non è stata riscontrata alcuna reazione infiammatoria.

Utilizzo

AJL Blue è stato concepito per interventi di chirurgia oculare nel segmento anteriore dell'occhio (ad esempio, cataratta) per evidenziare la capsula anteriore del cristallino. Grazie alla colorazione, la capsula anteriore viene resa maggiormente visibile semplificando la capsuloressi e riducendo il rischio di rottura.

- Capsuloressi.
- Facoemulsificazione.
- Chirurgia della cataratta con piccola incisione.
- Chirurgia extra capsulare della cataratta.
- Capsulotomia anteriore / posteriore.
- Peeling della membrana.
- Visualizzazione migliorata.

Composizione

1 ml di AJL Blue (concentrazione 0,06%) contiene:

- 0,6 mg di trypan blue
- Idrogeno fosfato disodico ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times 2 \text{H}_2\text{O}$)
- Di-idrogeno fosfato di sodio ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times 2 \text{H}_2\text{O}$)
- Cloruro di sodio (NaCl)
- Acqua per preparazioni iniettabile

Istruzioni d'uso

AJL Blue non richiede diluizione. AJL Blue in siringa è pronto per l'uso. Per evitare una diluizione della soluzione nell'umore acqueo è opportuno iniettare una bolla d'aria in camera anteriore prima di iniettare AJL Blue. AJL Blue viene iniettato in camera anteriore con l'ausilio di una cannula smussa. Dopo pochi secondi è possibile procedere alla rimozione della soluzione attraverso lavaggi.

Controindicazioni

Non sono note controindicazioni se AJL Blue viene impiegato secondo le prescrizioni.

Effetti collaterali

AJL Blue è perfettamente compatibile con l'occhio. Si raccomanda comunque di procedere alla rimozione del colorante mediante lavaggio. AJL Blue non deve essere utilizzato in pazienti che hanno manifestato ipersensibilità o reazioni allergiche nei confronti del Trypan Blue. Si sconsiglia l'impiego in bambini, donne in gravidanza e donne che desiderano a breve affrontare una gravidanza.

Avvertenze

AJL Blue non dovrebbe essere lasciato nell'occhio per un tempo superiore ai 30 minuti.

Sterilizzazione

Sterilizzazione a vapore in autoclave.

Confezionamento

AJL Blue è disponibile in siringa pre-riempita sterile, singolarmente racchiusa in busta e completa di cannula luer lock da 27 G, contenente 1,0 ml di soluzione. Ogni confezione contiene 10 pezzi.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce e proteggere dal freddo. Evitare notevoli variazioni di pressione e di temperatura.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione

Prodotto

Codice

Prodotto

Codice

Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

AJL Blue - Confezione da 10
siringhe da 1,0 ml

AJB001

AJL Blue

1237826/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.3 Regola 7 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02030201

Fabbricante

AJL Ophthalmic S.A. - Spagna

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

CB MEDICAL

QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982

