

Bisturi monouso da Incisione Safeshield



La linea di bisturi per chirurgia oftalmologica FEATHER® è prodotta in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medico utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.

La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari ed ultra affilati.


Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende i bisturi realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutti i bisturi sono sterilizzati a raggi gamma e pronti per l'uso subito dopo l'apertura della confezione.

Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa e manipolazione sicura dello strumento.

Tutti i microbisturi FEATHER® sono disponibili con manico in alluminio, impugnatura in plastica o manico Safeshield™ per rispondere alle diverse esigenze di tutti i chirurghi.

I manici sono codificati per colore per facilitare l'identificazione del tipo di lama e dell'angolo di taglio.


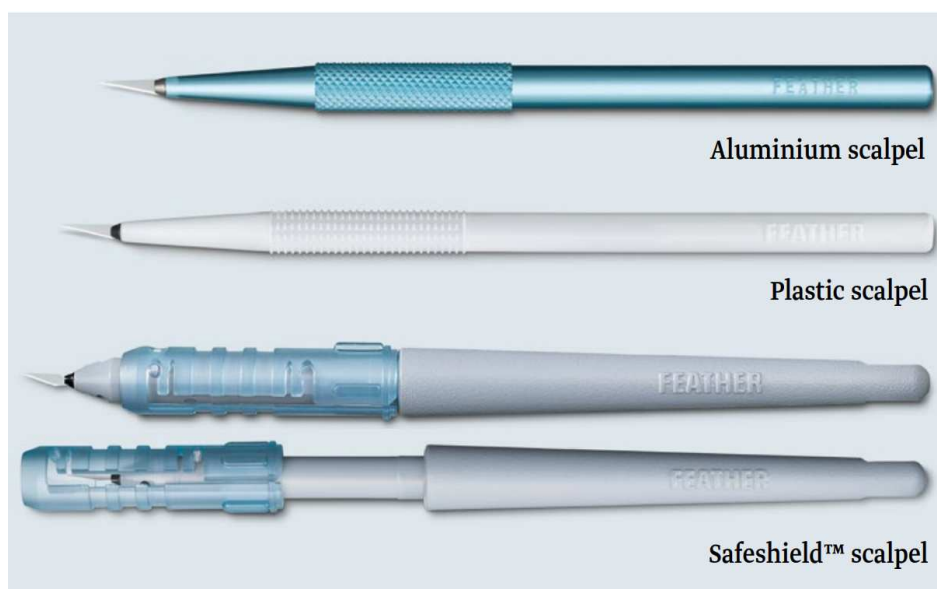


La linea di bisturi per chirurgia oftalmologica FEATHER® è stata progettata per consentire al chirurgo di ridurre al minimo la pressione esercitata sui tessuti oculari durante gli interventi chirurgici ed è caratterizzata dall'elevata qualità dei materiali e dall'accuratezza della lavorazione. Le lame sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medicale.


I manici sono fabbricati in PPE (polifenilene) modificato e PAR (poliarilato).

Safeshield™: una nuova linea di bisturi monouso per oftalmologia con dispositivo di protezione della lama per ridurre al minimo i rischi e garantire agli operatori la massima sicurezza e migliori prestazioni di taglio durante procedure chirurgiche


Prodotto conforme al Decreto Legislativo N° 19 del 19/01/2014 (Direttiva 2010/32/EU) e alle linee guida dell'European Biosafety Network.

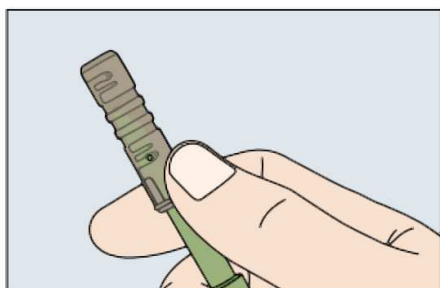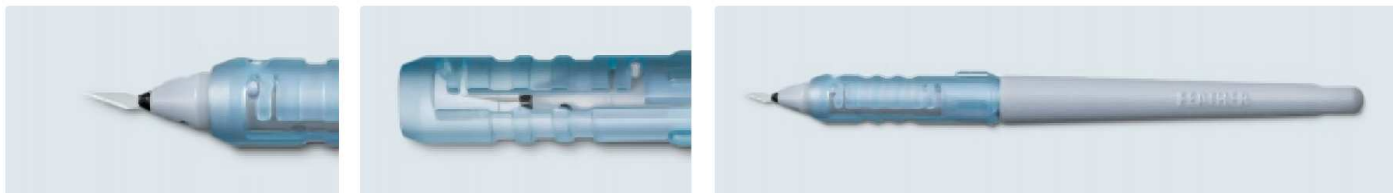

(1) Twist to unlock

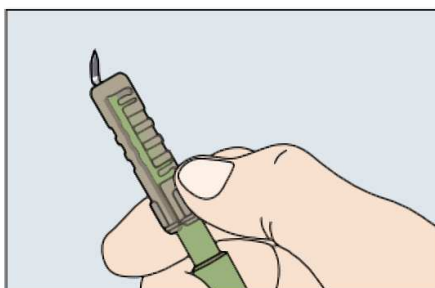

(2) Pull

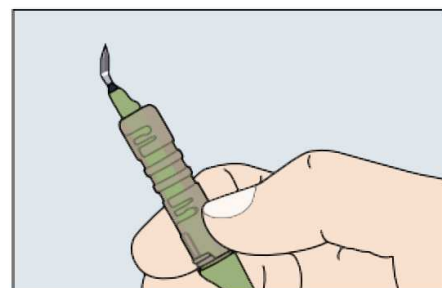

(3) Twist to lock

1) girare per sbloccare 2) tirare 3) girare per bloccare

Il dispositivo di sicurezza Safeshield™ presenta delle rientranze che permettono di bloccare la protezione della lama esponendola per l'uso o coprendola totalmente per quando il dispositivo non è in uso per ridurre al minimo i rischi e garantire agli operatori la massima sicurezza. Permette il riutilizzo del bisturi durante la medesima operazione per i tagli futuri.

Il meccanismo di sicurezza è integrato nel bisturi e non è un accessorio separato. Il meccanismo si attiva con una sola mano e non richiede alcun cambiamento nella tecnica del chirurgo e permette un pieno controllo sulla procedura.

Il meccanismo di sicurezza, quando viene attivato, è manifestato da un suono tipo "click".

Nome Commerciale

Micro Feather bisturi monouso per chirurgia oftalmologica.

Indicazioni d'uso

Interventi di chirurgia oftalmica.

Le lame ultra affilate dei bisturi Incision FEATHER® sono progettate per incisioni ottimali della sclera e della cornea.

Avvertenze

Bisturi per utilizzo medicale. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

Confezionamento

Ogni confezione contiene 5 microbisturi.

Ogni microbisturi è disponibile in custodia protettiva in polycarbonato, singolarmente racchiusa in apposita busta sterile.



Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione Prodotto

Codice Prodotto





Codice Fabbricante

Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici

Bisturi retto lama 15° monouso Safeshield	FHPSS715	PSS715	75855/R
Bisturi retto lama 22,5° monouso Safeshield	FHPSS722	PSS722	75863/R
Bisturi retto lama 30° monouso Safeshield	FHPSS730	PSS730	75866/R
Bisturi retto lama 45° monouso Safeshield	FHPSS745	PSS745	75867/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02010101

Blade shape	Blade angle
	15°
	22.5°
	30°
	45°

Fabbricante

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

Mandatario

pfm medical ag - Germany

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.



C.B. Medical Srl – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290
 PEC: cbmedical@legalmail.it - email: cbmedical@cbmedical.com – www.cbmedical.com

Rev. 2-19/06/2020