

Strisce Oftalmiche con 1mg fluoresceina sodica SIDA-FLUORO



Nome Commerciale

SIDA-FLUORO

Indicazioni d'uso

Le strisce oftalmiche con fluoresceina sodica sono indicate per l'utilizzo come ausilio per l'applicazione di lenti a contatto, rigide o morbide. Tingendo il tessuto corneale facilitano l'identificazione dei punti di contatto tra lente e cornea.

Distribuzione uniforme che garantisce una colorazione ottimale

Miglioramento del rilevamento di: Abrasioni corneali - Corpi estranei - Ulcere corneali erpetiche

Descrizione

Strisce Oftalmiche con 1mg fluoresceina sodica. Distribuzione uniforme che garantisce una colorazione ottimale.

Le strisce oftalmiche con fluoresceina sodica SIDA-FLUORO sono strisce di carta da filtro impregnate con colorante fluoresceina sodica e posizionate tra due fogli di carta normale gommata. Ogni striscia viene fornita sterile all'interno di una busta sigillata a calore secco.

Controindicazioni

Non utilizzare le strisce su pazienti che mostrano ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Sterilizzazione

Ossido di etilene (EO)

Confezionamento

Ogni striscia viene fornita sterile confezionata singolarmente all'interno di una busta sigillata a calore secco. Confezione secondaria in scatola di cartone da 100 pezzi.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente. Non esporre alla luce diretta e non congelare. La data di scadenza mostrata sulla confezione indica il periodo entro il quale il dispositivo deve essere utilizzato.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Smaltimento del prodotto e della confezione

Assicurarsi di smaltire i dispositivi utilizzati/scartati e le confezioni in maniera sicura e corretta, in conformità alle leggi che regolano lo smaltimento dei rifiuti biomedicali nel paese di utilizzo.

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
-----------------------------	------------------------	---------------------------	--

SIDA-FLUORO Strisce Oftalmiche con 1mg fluoresceina sodica sterili – confezione da 100 pezzi	SID91000	91000	1998884/R
--	----------	-------	-----------

Dispositivo non invasivo - Classe I - Rif. 1.1 Regola 1 All. IX del D.L. 46/97
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q0299 - dispositivi per oftalmologia - altri

Fabbricante

Sidapharm P.C. - Grecia

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

