


## Bisturi monouso Feather®

### Bisturi Feather

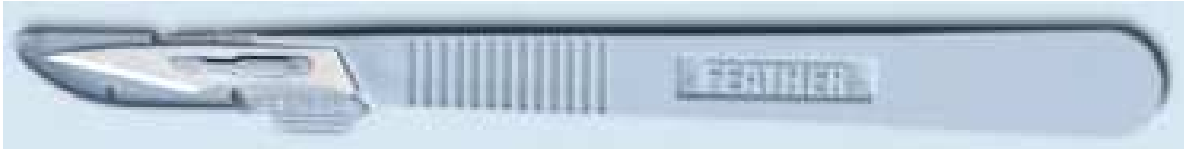

### Bisturi Feather Long



### Bisturi Feather Mini



La linea di bisturi e lame FEATHER® è prodotta in acciaio inossidabile di alta qualità di grado medicale utilizzando una tecnologia di affilatura ad alta precisione.


La tecnologia di affilatura ottimizzata e l'accurata selezione dei materiali consentono la produzione di lame con bordi di taglio regolari ed ultra affilati.

Il processo di produzione standardizzato garantisce una dimensione costante dell'incisione minimizzando il rischio di lesioni tissutali durante l'incisione.

Questo rende i bisturi realizzati da FEATHER®, produttore di lame di fama mondiale, strumenti di precisione ideali, con la garanzia di assoluta sicurezza sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Tutti i bisturi sono sterilizzati a raggi gamma e pronti per l'uso subito dopo l'apertura della confezione. Tutte le impugnature sono progettate per avere un peso ottimale per garantire una presa e manipolazione sicura dello strumento.

La linea di lame per chirurgia Feather è stata progettata per consentire al chirurgo di ridurre al minimo la pressione esercitata sui tessuti durante gli interventi chirurgici ed è caratterizzata dall'elevata qualità dei materiali e dall'accuratezza della lavorazione.

Le lame sono prodotte in acciaio inossidabile di grado medicale. I manici sono fabbricati in ABS (Acrilnitrile Butadiene Stirene) e sono disponibili in versione Standard, extra lunghi Long per cavità profonde e larghezza ridotta Mini.

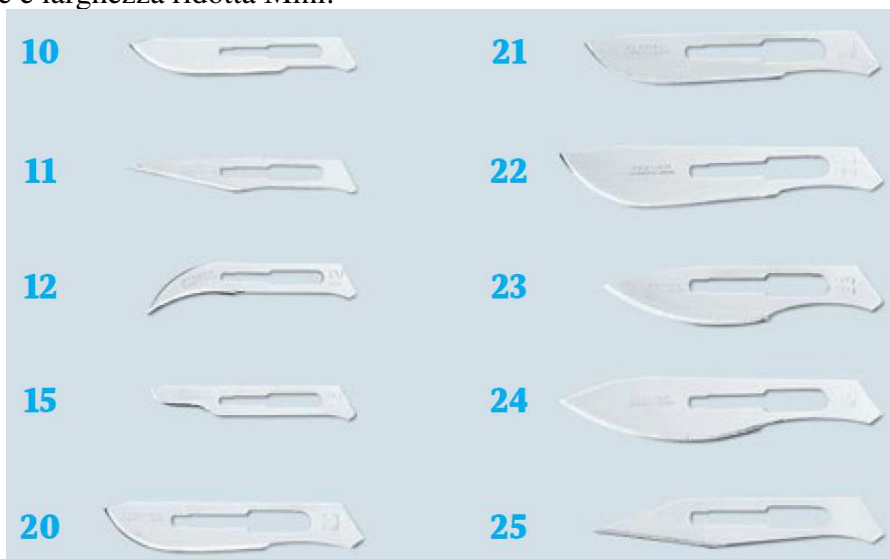

## Nome Commerciale

Feather bisturi monouso

## Indicazioni d'uso

Interventi invasivi e taglio tessuti in chirurgia, uso a breve termine.

**Bisturi Feather:** adatti a tutte le applicazioni chirurgiche.

**Bisturi Feather Long:** Il bisturi con manico in plastica, che è il doppio della lunghezza (23 cm) di un modello standard, lo rende più comodo da usare in operazioni profonde

**Bisturi Feather Mini:** Il mini bisturi con manico di 18 cm è ideale per tutti gli interventi chirurgici con campi operativi stretti.

## Avvertenze

Bisturi per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

## Sterilizzazione

Irradiazione Raggi Gamma 25kGy (R).

## Confezionamento


Ogni confezione contiene 20 bisturi monouso.

Ogni bisturi è singolarmente racchiuso in apposito foglio di alluminio sterile.

## Utilizzo

Aprire la confezione di foglio di alluminio come illustrato: semplicemente tirando i due lembi separati

Rimozione della protezione della lama: premere delicatamente sulla linguetta a scatto come illustrato.

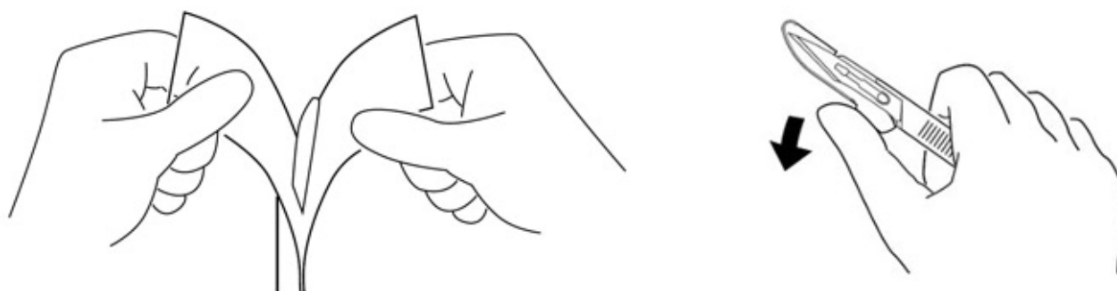

## Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free

## Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

## Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

## Materiale informatico (video online)

<https://www.youtube.com/watch?v=1bHsy5xRpH8>

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Codice Fabbricante	Numero di registrazione Banca Dati Dispositivi Medici
Bisturi Feather Figura 10 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH10	10S	73704/R
Bisturi Feather Figura 11 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH11	11S	73712/R
Bisturi Feather Figura 12 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH12	12S	73714/R

Bisturi Feather Figura 12D manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH12D	12DS	73718/R
Bisturi Feather Figura 14 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH14	14S	73721/R
Bisturi Feather Figura 15 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH15	15S	73725/R
Bisturi Feather Figura 15C manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH15C	15CS	73729/R
Bisturi Feather Figura 20 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH20	20S	73732/R
Bisturi Feather Figura 21 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH21	21S	73737/R
Bisturi Feather Figura 22 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH22	22S	73741/R
Bisturi Feather Figura 23 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH23	23S	73753/R
Bisturi Feather Figura 24 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH24	24S	73771/R
Bisturi Feather Figura 25 manico lunghezza 140 mm sterile monouso	FH25	25S	73772/R
Bisturi Feather Long Figura 10 manico lunghezza 230 mm sterile monouso	FHD10	10SD	74006/R
Bisturi Feather Long Figura 11 manico lunghezza 230 mm sterile monouso	FHD11	11SD	74011/R
Bisturi Feather Long Figura 15 manico lunghezza 230 mm sterile monouso	FHD15	15SD	74012/R
Bisturi Feather Long Figura 20 manico lunghezza 230 mm sterile monouso	FHD20	20SD	74013/R
Bisturi Feather Long Figura 21 manico lunghezza 230 mm sterile monouso	FHD21	21SD	74015/R
Bisturi Feather Long Figura 22 manico lunghezza 230 mm sterile monouso	FHD22	22SD	74016/R
Bisturi Feather Long Figura 23 manico lunghezza 230 mm sterile monouso	FHD23	23SD	74019/R
Bisturi Feather Mini Figura 11 manico lunghezza 180 mm sterile monouso	FHM11	11SM	73788/R
Bisturi Feather Mini Figura 14 manico lunghezza 180 mm sterile monouso	FHM14	14SM	73798/R
Bisturi Feather Mini Figura 15 manico lunghezza 180 mm sterile monouso	FHM15	15SM	73800/R

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice V0101

**C.B. Medical Srl** – Viale Europa 78, 20047 Cusago (MI) - Tel. 02 48601166 - Fax 02 48600290  
 PEC: [cbmedical@legalmail.it](mailto:cbmedical@legalmail.it) - email: [cbmedical@cbmedical.com](mailto:cbmedical@cbmedical.com) – [www.cbmedical.com](http://www.cbmedical.com)

Rev. 3-01/01/2020

**Fabbricante**

Feather Safety Razor CO. Ltd - Medical Division - Japan

**Mandatario**

pfm medical ag - Germany

**Distributore autorizzato**

C.B. Medical S.r.l.

