


Kit per chirurgia estetica Silkann GTI®



La forma del foro laterale della cannula Sterimedix corrisponde al diametro della cannula per ottimizzare il controllo e il flusso del filler.



Foro laterale standard

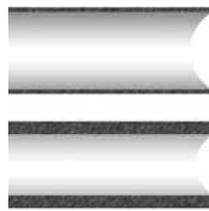


pareti ultra sottili

pareti di una cannula standard



La cannula monouso GTI® è stata appositamente progettata per un controllo preciso attraverso una maggiore densità e tessuti fibrotici del viso per la subincisione di piccoli difetti della superficie facciale. La punta della cannula presenta un design rivoluzionario: la punta scanalata ottimizza la subincisione senza danneggiare i corpi o i vasi critici.

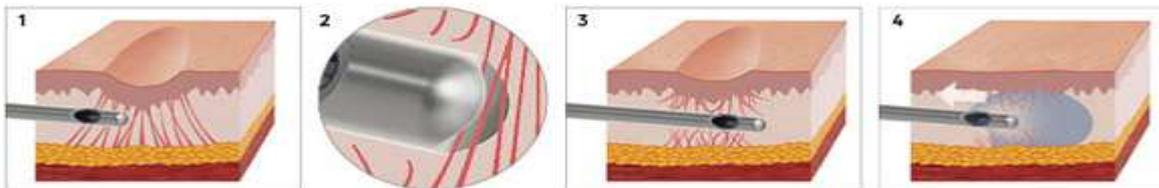

1. La cannula per iniezione con punta scanalata è progettata per muoversi in modo sicuro attraverso una maggiore densità e tessuto fibrotico del viso.
2. Micro subincisione di fili fibrosi.
3. I fili fibrosi sono sbloccati.
4. Iniezione di filler dermico per riempire il vuoto al momento dell'estrazione della cannula.

Gli aghi cannula Sterimedix Silkann sono prodotti in acciaio inossidabile di grado medicale, silicone e polipropilene copolimerizzato. I connettori sono di tipo Luer Lock.

Le cannule Silkann sono realizzate secondo i più alti standard per garantire un'esperienza di utilizzo che aiuti ad ottenere il miglior risultato possibile per i vostri pazienti.

Le cannule sono realizzate per garantire che il flusso di iniezione sia ideale per l'utente sia per il paziente.

Le cannule Silkann hanno un esclusivo connettore in policarbonato che presenta una filettatura per ridurre il rischio di distacco sotto pressione. Il connettore è compatibile con tutti i tipi di siringhe per filler. È presente inoltre un indicatore sul connettore per mostrare l'orientamento del foro laterale.

Le pareti ultra sottili della cannula Sterimedix aumentano il diametro interno della cannula e riducono le forze di iniezione.

La forma del foro laterale della cannula Sterimedix corrisponde al diametro della cannula per ottimizzare il controllo e il flusso del filler.

Materiale informatico (video online)

<https://www.youtube.com/watch?v=wfKy49UrJIo>

<https://www.youtube.com/watch?v=nnexOCQOa0w>

Nome Commerciale

Kit monouso per chirurgia estetica.

Indicazioni d'uso

Somministrazione, infiltrazione e riempimento a livello sottocutaneo.

Avvertenze

Dispositivo per utilizzo medico. Maneggiare con cura.

Sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO).

Confezionamento

Confezionamento primario = 1 pezzo. Ogni kit monouso è confezionato singolarmente in custodia protettiva sterile.

Confezionamento secondario = Scatola da 10 pezzi.

Validità

5 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Non richiede specifico posizionamento della confezione.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Descrizione**Prodotto****Codice
Prodotto****Codice
Fabbricante****Numero di
registrazione
Banca Dati
Dispositivi Medici**

Kit per chirurgia estetica GTI composto da:
• cannula sterile monouso Sterimedix Silkann GTI® (Amar) 25 gauge (0,50 mm) lunghezza 40 mm flessibile penetrazione facilitata parete ultra sottile foro laterale
• ago sterile monouso Sterimedix 23 gauge x 1/2" (0,64 x 12,7 mm) parete sottile per iniezione


SM1852A

AJ1852A

Registrazione in corso

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.2 Regola 6 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice A019013

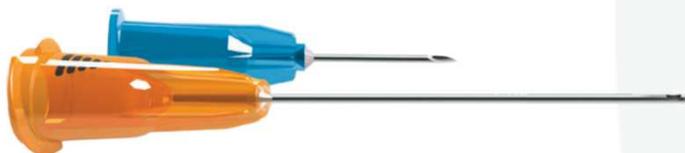NEW**GTI CANNULA®****25 GAUGE GTI CANNULA + 23 GAUGE PRE-HOLE NEEDLE**

AJ 1852A	25g UTW x 40mm	GTI Cannula® (Amar) + 23g pre-hole needle	Box
			10



AE 1711	20g UTW x 60mm	Straight fat transfer cannula with screw thread hub, closed end and single side port	Box
			40

Fabbricante

Sterimedix Ltd - UK

Distributore autorizzato

C.B. Medical S.r.l.

CB MEDICAL
QUALITY AND INNOVATION IN MEDICAL DEVICES SINCE 1982



STERIMEDIX®
Innovative single-use ophthalmic and aesthetic products